

INDIKÁCIE

STÉRIMAR™ Na alergickú nádchu

je zdravotnícka pomôcka pre dojčatá, deti a dospelých odporúčaná na:

- čistenie nosa a odstraňovanie alergénov z nosovej sliznice,
- hydratáciu a obnovu prirodzenej vlhkosti nosovej sliznice,
- prevenciu rozvoja príznakov alergickej nádchy.

STÉRIMAR™ Na alergickú nádchu sa odporúča na začiatku alergickej sezóny na čistenie nosovej sliznice pred podávaním iných liekov do nosa na alergiu.

Nespôsobuje ospalosť.

*Štúdia so 60 dospelými ľuďmi, 30 z nich používalo Stérimar denne počas 5 mesiacov popri bežnej liečbe alergickej nádchy (M. Grasso et al., 2018)

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím vykonajte krátky strek do priestoru, aby ste spustili systém.

Hygiena a zvlhčovanie nosovej sliznice

Hlavu držte vzpriamene a vložte trysku do nosovej dierky. Do každej nosovej dierky vstreknite raz alebo dvakrát. Nadbytočný roztok nechajte vytečť a potom si nos vyfúkajte.

Hlbšie čistenie nosovej dutiny

Nakloňte hlavu na jednu stranu a vložte trysku do hornej nosovej dierky. Vstreknite raz, dlhšie (2 až 3 sekundy). Nadbytočný roztok nechajte vytečť druhou nosovou dierkou a potom si nos vyfúkajte. Po každom použití očistite trysku teplou vodou a osušte suchou handričkou.

DÁVKOVANIE: 2 až 6 vstrekov denne.

Vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy.

ZLOŽENIE

STÉRIMAR™ Na alergickú nádchu je

**fyziologický roztok morskej vody, ktorý obsahuje rovnakú koncentráciu solí, ako je koncentrácia solí v bunkách ľudského tela. STÉRIMAR™, filtrovaná morská voda, 100% prírodná a bez konzervačných látok, prináša výhody uznávaných vlastností minerálnych solí a morských stopových prvkov a navyše je obohatená o mangán.

Morská voda: 31,82 ml

Monohydrát manganatej soli

Čistená voda do 100 ml

Asepticky balené

Nádobka pod tlakom inertného plynu (dusík).

Roztok sa nachádza vo vnútornej nádobke a neprichádza do styku s dusíkom.

Čistý objem: 50 ml e 

Približne 150 vstrekov



UPOZORNENIE

Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí.



Sofibel - Laboratoires Fumouze, Francúzsko