

Už od roku 1975 je STÉRIMAR™ priekopníkom v oblasti nosovej hygieny. Využíva prirodzenú silu mora pre zdravie nosa.

INDIKÁCIE

STÉRIMAR™ baby Hygiena nosa je zdravotnícka pomôcka odporúčaná pre deti vo veku od 0 do 3 rokov na:

- **Jemné čistenie nosa a odstránenie nečistôt**
- **Hydratáciu a obnovu prirodzenej vlhkosti nosovej sliznice**
- Posilnenie obrannej schopnosti nosovej sliznice a **prevenciu nádchy****
- **Zlepšenie dýchania a spánku** a uľahčenie **dojčenia** alebo **kŕmenia z fľaše**

****čistením nosovej dutiny morskou vodou.**

STÉRIMAR™ spreje používajú fyzioterapeuti pri liečbe zápalu priedušničiek.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím vykonajte krátky strek do priestoru, aby ste spustili systém. **Hygiena a zvlhčovanie nosovej sliznice:** Jemne vložte trysku do nosovej dierky. Do každej nosovej dierky vstreknite raz alebo dvakrát. Nadbytočný roztok nechajte vyteciť a potom nos utrite. **Čistenie nosovej dutiny:** Dieťa vo veku do 2 rokov uložte na bok, dieťa od 2 rokov posadte. Nakloňte hlavu dieťaťa na jednu stranu a jemne vložte trysku do hornej nosovej dierky. Stlačte trysku približne na 2 sekundy. Nadbytočný roztok nechajte vyteciť druhou nosovou dierkou a potom nos utrite. Postup zopakujte aj v druhej nosovej dierke. Po každom použití očistite trysku teplou vodou a osušte.

DÁVKOVANIE: 2 až 6 vstrekov denne.

ZLOŽENIE

STÉRIMAR™ baby Hygiena nosa

je *fyziologický roztok morskej vody, ktorý obsahuje rovnakú koncentráciu solí, ako je koncentrácia solí v bunkách ľudského tela. STÉRIMAR™, filtrovaná morská voda, 100% prírodná a bez konzervačných látok, prináša výhody uznávaných vlastností minerálnych solí a morských stopových prvkov, ako sú zinok, meď, mangán, železo, horčík a selén.

Morská voda: 31,82 ml

Čistená voda do 100 ml

Asepticky balené

Nádobka pod tlakom inertného plynu (dusík). Roztok sa nachádza vo vnútornej nádobke a neprichádza do styku s dusíkom.

Čistý objem: 100 ml e 

Približne 300 vstrekov

Upozornenie

Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Uchovávajte mimo dosahu detí.

 **SOFIBEL - Laboratoires Fumouze**
110-114, rue Victor Hugo
92686 Levallois-Perret Cedex - Francúzsko

www.sterimar.sk

