

## **STÉRIMAR® baby**

Fyziologický roztok morskej vody na dennú hygienu nosa pre deti vo veku od 0 do 3 rokov.  
mikrosprej  
zdravotnícka pomôcka

STÉRIMAR® baby má špeciálny bezpečnostný aplikátor, ktorý umožňuje veľmi jemnú aplikáciu prírodnej morskej vody.

STÉRIMAR® baby pomáha:

- šetrne vyčistiť detský nos aj u detí, ktoré ešte nevedia fúkať z nosa
- zvlhčovať suchú nosovú sliznicu
- obnovovať poškodenú nosovú sliznicu
- posilňovať obranyschopnosť nosovej sliznice
- uľahčiť dojčenie a spánok dojčiat
- predchádzať komplikáciám nádchy (zápal prínosových dutín a zápal stredného ucha)
- urýchliť hojenie po operáciách v oblasti horných dýchacích ciest.

### **Zloženie**

100 ml čistenej vody obsahuje 31,82 ml morskej vody.

STÉRIMAR® baby je fyziologický\* filtrovaný roztok morskej vody, 100% prírodný, bez konzervačných látok.

\* Fyziologický roztok obsahuje rovnakú koncentráciu solí ako tekutiny v bunkách ľudského tela, preto je vhodný na každodennú hygienu nosa.

### **Dávkovanie**

2 až 6 krát denne krátko vstreknúť do každej nosovej dierky.

Môže sa použiť v každej polohe.

Bez obmedzenia doby podávania.

### **Spôsob podania**

1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Vykonajte prvý vstreknúť (dávku) do priestoru, aby sa spustil systém mikrodifúzie.
3. Dieťa uložte na bok alebo ho posaďte s hlavou naklonenou na jednu stranu.
4. Jemne vsuňte aplikátor do nosovej dierky.
5. Aplikátor krátko stlačte.
6. Nadbytok roztoku nechajte stiecť sliznicami dolu. Potom nos vyfúkajte a utrite vreckovkou.
7. Rovnakým spôsobom vyčistíte aj druhú nosovú dierku.
8. Aplikátor umyte vodou so saponátom, dobre opláchnite a vysušte.

Obsah: 50 ml, približne 150 dávok.

Výrobca: Sofibel Laboratoires Fumouze, Francúzsko

Dovozca: Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava, Tel. 02/49 267 111

[www.sterimar.sk](http://www.sterimar.sk)