

STÉRIMAR® baby

Na upchatý nos

Hypertonický roztok morskej vody obohatený o meď na uvoľnenie upchatého nosa pre deti vo veku od 3 mesiacov do 3 rokov.

- mikrosprej
- zdravotnícka pomôcka

STÉRIMAR® baby Na upchatý nos má špeciálny bezpečnostný aplikátor, ktorý umožňuje veľmi jemnú aplikáciu hypertonickej morskej vody.

STÉRIMAR® baby Na upchatý nos pomáha:

- prirodzene uvoľniť upchatý nos
- potláčať rast baktérií a riziko superinfekcie z nosových dutín
- chrániť pred komplikáciami nádchy (zápal prínosových dutín a zápal stredného ucha)

Zloženie

100 ml obsahuje 60 ml morskej vody, meď (Cu²⁺), mangán (Mn²⁺), čistenú vodu.

STÉRIMAR® baby Na upchatý nos je hypertonický* filtrovaný roztok morskej vody, 100% prírodný, bez konzervačných látok. Na princípe osmózy uvoľní opuch nosovej sliznice a obnoví priechodnosť nosa. Navyše je obohatený o meď, ktorá má výrazné antibakteriálne účinky.

* Hypertonický roztok obsahuje vyššiu koncentráciu solí ako tekutiny v bunkách ľudského tela.

Dávkovanie

- 2 až 6 vstrekov denne do každej nosovej dierky.
- Určený na krátkodobé podávanie (nie dlhšie ako 2 týždne).

Po ukončení podávania sa odporúča pokračovať s prípravkom **Stérimar® baby**.

Spôsob podania

1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Vykonajte prvý vstrek (dávku) do priestoru, aby sa spustil systém mikrodifúzie.
3. Dieťa uložte na bok alebo ho posaďte s hlavou naklonenou na jednu stranu.
4. Jemne vsuňte aplikátor do nosovej dierky.
5. Aplikátor krátko stlačte.
6. Nadbytok roztoku nechajte stiecť sliznicami dolu. Potom nos vyfúkajte a utrite vreckovkou.
7. Rovnakým spôsobom vyčistite aj druhú nosovú dierku.
8. Aplikátor umyte vodou so saponátom, dobre opláchnite a vysušte.

Obsah: 50 ml, približne 150 dávok.

Výrobca: Sofibel Laboratoires Fumouze, Francúzsko

Dovozca: Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábřeží 4, 810 06 Bratislava, Tel. 02/49 267 111, www.sterimar.sk