

STÉRIMAR

Cu

med'

Fyziologický roztok morskej vody so stopovým množstvom medi
Mikrosprej
Zdravotnícka pomôcka

Čistý nos je základ dobrého dýchania.

Nos a nosová sliznica majú dôležitú úlohu. Zvlhčujú, zohrievajú a čistia vdychovaný vzduch. Ak je nosová sliznica vysušená alebo nos je upchatý, nemôžu plniť tieto svoje základne fyziologické funkcie. Navyše hlieny sú často príčinou infekcií v oblasti uší, nosa a hrdla.

Morská voda sa získava z hlbokých vôd viac ako 15 míľ od pobrežia, kde nemôže byť znečistená pobrežnými prúdmi. Po kontrole sa morská voda čistí (purifikuje) a upraví na fyziologickú koncentráciu. Preto aplikácia STERIMARU Cu nie je bolestivá a nedráždi.

STÉRIMAR Cu obohatený o stopové množstvo medi vo forme soli je určený ako podporný prostriedok pri liečbe akútnych a chronických infekcií horných dýchacích ciest – *med' pôsobí baktericídne a protizápalovo.*

STÉRIMAR Cu uľahčuje vyčistenie (vyfúkanie) nosa, zbavuje ho hlienov a obnovuje prirodzenú vlhkosť nosovej sliznice.

Zloženie

100 ml obsahuje 31,82 ml morskej vody, pentahydrát med'natej soli, čistená voda.
Inertný hnací plyn: dusík

Dávkovanie

2 až 4 krát denne krátko vstreknúť do každej nosovej dierky.
STÉRIMAR Cu sa môže použiť v každej polohe. Anatomicky prispôbená trubica je bezpečná pri aplikácii do nosových otvorov dojčiat, detí i dospelých.
Odporúča sa nepoužívať dlhšie ako 14 dní.

Spôsob použitia

1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Jemne vsuňte nástavec do nosovej dierky.
3. Nástavec krátko stlačte.
4. Nadbytok roztoku nechajte stiecť sliznicami dolu. Potom nos vyfúkajte.
5. Nástavec omyte vodou so saponátom, dobre opláchnite a vysušte.

Približne 150 dávok

Obsah 50 ml

Výrobca: Sofibel Laboratoires Fumouze, Francúzsko

Dovozca: Merck spol. s .ro., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava