

# STÉRIMAR®

## Na upchatý nos

Hypertonický roztok morskej vody obohatený o meď na uvoľnenie upchatého nosa pre deti od 3 rokov a dospelých.

- mikrosprej
- zdravotnícka pomôcka

**STÉRIMAR® Na upchatý nos** pomáha:

- prirodzene uvoľniť upchatý nos
- potláčať rast baktérií a riziko vzniku superinfekcie z nosových dutín
- chrániť pred komplikáciami nádchy (zápal prínosových dutín a zápal stredného ucha).

### Zloženie

100 ml obsahuje 75 ml morskej vody, meď (Cu<sup>2+</sup>), mangán (Mn<sup>2+</sup>), čistenú vodu.

**STÉRIMAR® Na upchatý nos** je hypertonický\* filtrovaný roztok morskej vody, 100% prírodný, bez konzervačných látok. Na princípe osmózy uvoľní opuch nosovej sliznice a obnoví priechodnosť nosa. Navyše je obohatený o meď, ktorá má výrazné antibakteriálne účinky.

\* Hypertonický roztok obsahuje vyššiu koncentráciu solí ako tekutiny v bunkách ľudského tela.

### Dávkovanie

- 2 až 6 vstrekov denne do každej nosovej dierky.
- Určený na krátkodobé podávanie (nie dlhšie ako 2 týždne).

Po ukončení podávania sa odporúča pokračovať s prípravkom **Stérimar®**.

### Spôsob použitia

1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Vykonajte prvý vstrek (dávku) do priestoru, aby sa spustil systém mikrodifúzie.
3. Jemne vsuňte aplikátor do nosovej dierky.
4. Aplikátor krátko stlačte.
5. Nadbytok roztoku nechajte stiecť sliznicami dolu. Potom nos osušte alebo vyfúkajte.
6. Rovnakým spôsobom vyčistite aj druhú nosovú dierku.
7. Aplikátor umyte vodou so saponátom, dobre opláchnite a vysušte.

**Obsah:** 50 ml, približne 150 dávok.

**Výrobca:** Sofibel Laboratoires Fumouze, Francúzsko

**Dovozca:** Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábřežie 4, 810 06 Bratislava, Tel. 02/49 267 111  
[www.sterimar.sk](http://www.sterimar.sk)